

# PhotoPHONE 100

Forstærket foto-ID-telefon



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>INDHOLD</b> .....	<b>1</b>
<b>INTRODUKTION</b> .....	<b>2</b>
Udpakning af telefonen .....	3
<b>BESKRIVELSE</b> .....	<b>4</b>
Generel beskrivelse .....	4
<b>INSTALLERING</b> .....	<b>6</b>
Opsætning .....	6
Montering på væggen .....	6
<b>INDSTILLINGER</b> .....	<b>7</b>
Indstillinger for ringelyd .....	7
Indstillinger for blink (på hold) .....	7
Indgående lyd og toneindstillinger .....	7
Lydindstillinger for røret .....	8
<b>BRUG AF TELEFONEN</b> .....	<b>9</b>
Foretage en opringning .....	9
Modtage en opringning .....	10
Ring tilbage til sidste nummer .....	10
Mute-funktion .....	10
Brug af høreapparat .....	10
Blinkesignal .....	10
<b>HUKOMMELSE</b> .....	<b>11</b>
Gemme et nummeri hukommelsen.....	11
Ring et nummer fra hukommelsen.....	12
<b>PROBLEMLØSNING</b> .....	<b>12</b>
<b>SIKKERHEDSINFORMATION</b> .....	<b>13</b>
<b>GARANTI</b> .....	<b>14</b>
<b>GENBRUGSDIREKTIVER</b> .....	<b>15</b>

# INTRODUKTION

Se venligst vores webside: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for en opdateret brugerguide, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer som du bør kende til!

Tillykke med købet af din nye Geemarc PHOTOPHONE 100. Dette er forstærket telefon med store knapper. Displayet med de store knapper er let at se og bruge og det hjælper med at undgå, at man trykker forkert nummer. Der er ringe-knapper med billeder som også er designet for at foretage opkald, da du kan identificere disse hurtig-knapper med billeder af dine venner og familie. Denne telefon er kompatibel med høreapparater.

Det er vigtigt, at du læser instruktioner for neden for at få det fulde potentiale ud af din Geemarc telefon. Opbevar denne brugermanual et sikkert sted for fremtidig brug.

Denne manuel forklarer, hvordan den følgende telefon:

## PHOTOPHONE 100



# INTRODUKTION

## Udpakning af telefonen

---

Når du pakker telefonen ud, bør du finde det følgende i æsken:

- 1 PHOTOPHONE 100 unit
- 1 PHOTOPHONE 100 telefonrør med krøllet ledning.
- 1 telefonkabel
- 1 brugermanual




For produktsupport og hjælp besøg vores webside på  
**[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

E-mail : **[help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)** Telefon : **01707 387602**



Linjerne er åbne 09-00 til 16-00 mandag til fredag  
2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex,  
Frankrig

# BESKRIVELSE

## General beskrivelse

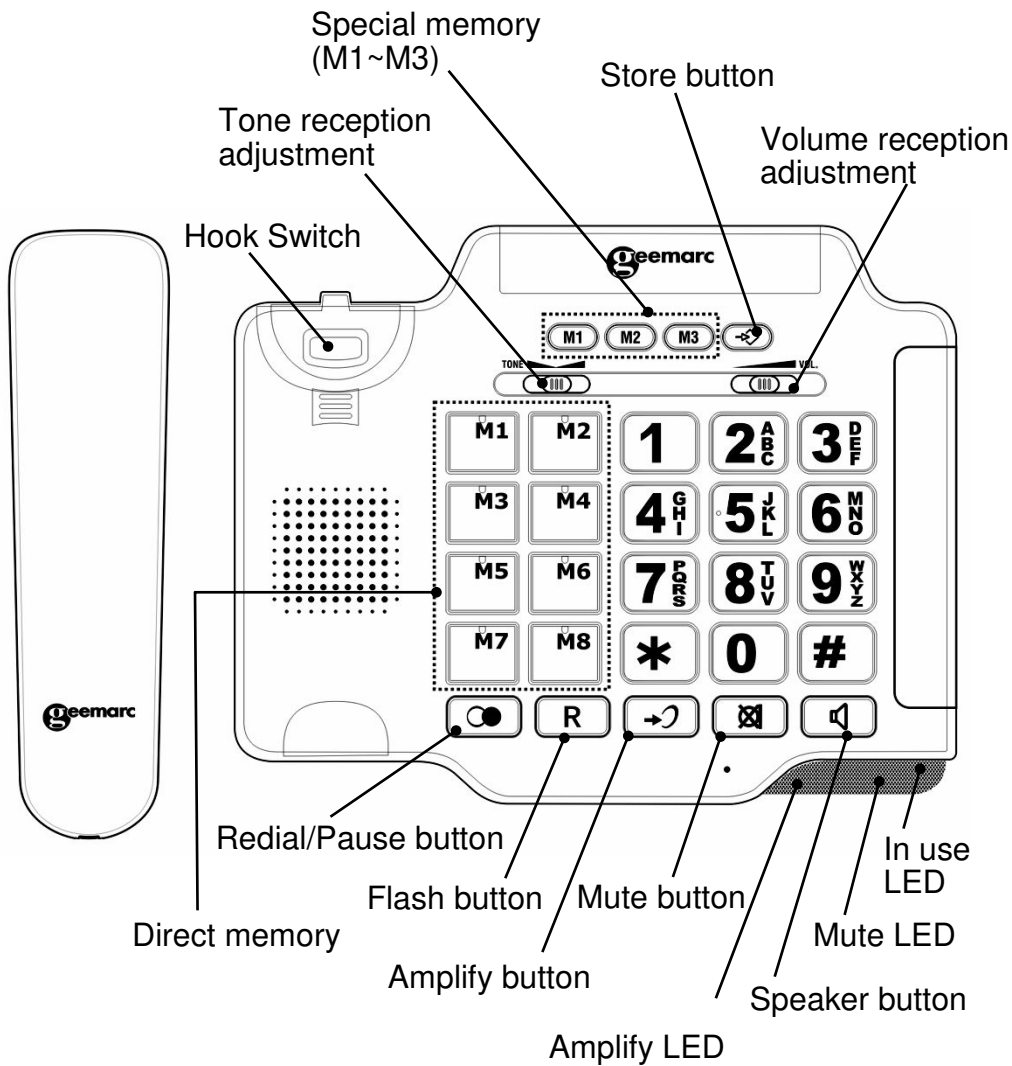

# BESKRIVELSE

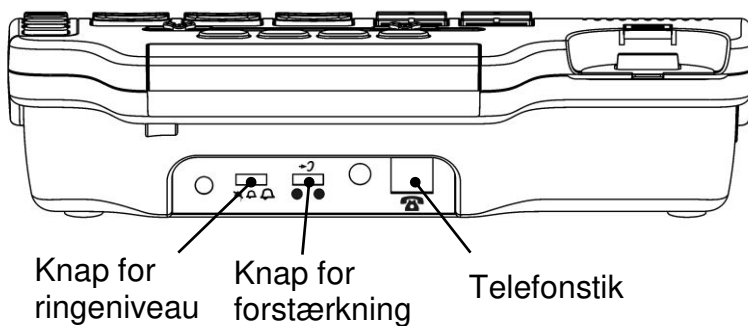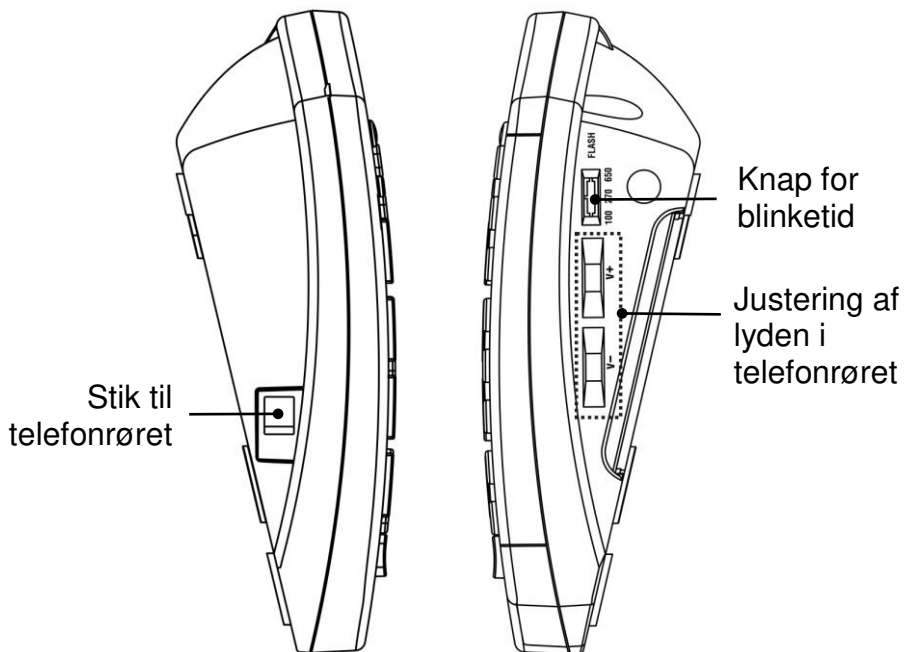

# INSTALLERING

## Opsætning

Sæt røret sammen med en af enderne af den krøllede ledning. Sæt den anden ende af den krøllede ledning i stikket på venstre side af din PHOTOPHONE 100. Læg røret på telefonen.

Forbind telefonledning til sticker bag på telefonen og sæt så den anden ende af telefonledningen i stikket i væggen\*.

(\*) Benævnt TNV-3 ifølge EN62368-1 standarden

## Montering på væg

Træk den splinten til at hænge røret på ud og vend dens position (roter den 180 grader). Skub den tilbage på plads, så kroger peger op ad (se billede 1).

Dette forhindrer røret i at falde ud af telefonen når den sidder på væggen.

Skrue to skruer i væggen (medfølger ikke) med 80 mm mellemrum i en vertikal linje.

Sæt telefonen på skruerne og lad den glide ned for at sikre den (se billede 2).

Drej på krogeren i telefonen så røret kan placeres på krogeren.

Diagram 1


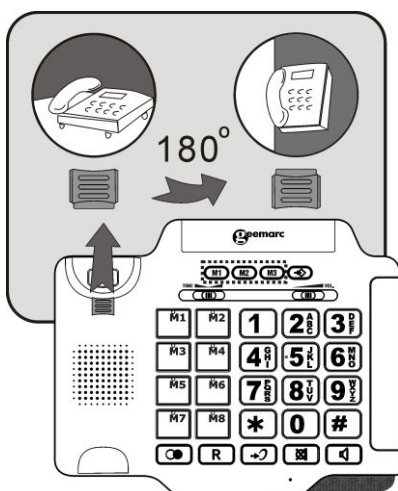





Diagram 2

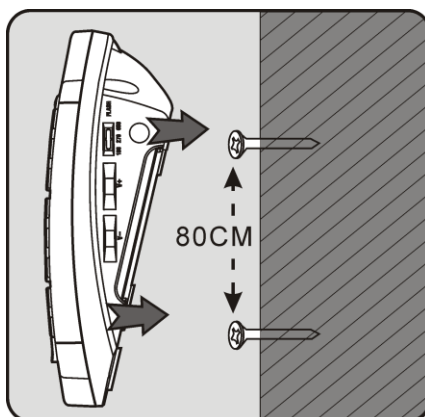


# SETTINGS

## Indstillinger for ringelyd


En knap bag på PHOTOPHONE100 gør det muligt sætte ringelyden    til **HØJ** (maksimalt niveau), **LAV** (lavest niveau) eller AF (hvis du ikke vil blive forstyrret).


## Indstilling for blink (på hold)

Du kan justere blinketiden ved at bruge knappen  FLASH som findes på højre side af din telefon. Der er tre tilgængelige niveauer, 100ms, 270ms og 650 ms. Din telefon fungerer med en blinketid for Storbritanien (R=100ms).

## Indgående lyd og toneindstillinger

Du kan justere den indkommende lyd og tonen under en samtale ud fra dine hørselskrav.

Brug knappen Volume slide control  **VOL.** på telefonen for at justere niveauet. Det er muligt at justere lyden til 0-15dB.

Knappen **AMPLIFY**  på telefonen giver en yderligere forstærkning på 15dB så for eksempel justering af lyden blive 15-30dB. Når amplify-funktionen er aktiveret, er LED-lyset i Amplify tændt.



### Valg af standard forstærkning.


Knappen Amplify **ON/OFF**  bag på telefonen gør, at forstærkning er **TÆNDT** eller **SLUKKET** som standard hver gang telefonen bruges.


### Knappen **AMPLIFY ON/OFF** sat til **ON-position**

Den ekstra forstærkning og tonekontrol er automatisk aktiveret, hver gang du bruger telefonen. LED-lampen Amplify vil lyse når du bruger telefonen.





# INDSTILLINGER


Hvis man trykker på knappen Amplify button →  under en samtale, vil den ekstra forstærkning og tonekontrol blive deaktiveret. Du kan dog stadig justere indkommende lyd i røret ved at justere på knappen Volume.

Uanset hvor mange gange du trykker på knappen for forstærkning →  under en samtale, vil disse funktioner blive aktiveret igen næste gang du løfter røret for at foretage et opkald.


## Knappen AMPLIFY ON/OFF sat til OFF-position

Den ekstra forstærkning og tonekontrol er DEaktiveret, hver gang du bruger telefonen. LED-lampen Amplify vil være slukket når du bruger telefonen.

Ved at trykke på knappen Amplify →  en gang under en samtale bliver tonekontrol og ekstra forstærkning aktiveret. LED-lyset til blive tændt for at vise denne ændring. Hvis du trykker på forstærkningsknappen →  en gang til, vil den ekstra forstærkning og tonekontrol-funktionerne blive deaktiveret endnu en gang. LED-lyset vil blive slukket for vise denne ændring.

Uanset hvor mange gange du trykker på knappen for forstærkning →  under en samtale, vil disse funktioner blive deaktiveret igen næste gang du løfter røret.

## Justering af tone

Hvis den indkommende tone er blevet forstærket, kan tonekontrol TONE  også justeres. Du kan justere og øge høj- eller lavfrekvenslydene med knapperne for tonekontrol øverst på telefonen.

Bass  Treble  
+10db max  +10db max

**Bemærk:** Funktionen justering af tone vil ikke have nogen effekt når den indkommende lyd er sat til normalt niveau.

# INDSTILLINGER

## Indstillinger af lyden i telefonrøret

I håndfri status kan du justere lyden i røret ved at bruge knapperne V+ eller V- på højre side af telefonen

### Foretage et opkald

Løft røret.

Når du hører klartonen, trykker du nummeret på tastaturet.


For at afslutte samtalen ligger du ganske enkelt bare røret på

### Foretage et opkald – Håndfrit

Tryk på knappen  for at få en klartone

Tast telefonnummeret ind på telefonen.

For at afslutte samtalen trykker du bare på  igen

For at aktivere funktionen Håndfri under en samtale trykker du på knappen **SPEAKER**  og lægger røret på telefonen samtidigt.

For at deaktivere funktionen Håndfri under en samtale løfter du røret.

**Bemærk:** Når telefonen er i Håndfri-status kan kun en person tale ad gangen. Vekslingen mellem mikrofon og højttaler sker automatisk. Dette er afhængig af lydniveauet på den indkommende samtale og mikrofonen. Derfor er det vigtigt, at der ikke er nogle høje lyde som f.eks. musik i nærheden af telefonen, da det vil forstyrre den håndfri funktion.

# BRUG AF TELEFONEN

## Få en samtale


---


Ved indkommende samtale ringer telefonen og LED-lysene for indkommende samtaler lyser op.

Løft røret og tal

For at afslutte samtalen ligger du ganske enkelt bare røret på


## Indkommende samtale – Håndfri


Tryk på  for at snakke håndfrit

Tryk på  for at afslutte

## Ring tilbage til sidste nummer

---


Løft røret og tryk på  for håndfrit brug


Tryk på  for at ringe til det sidst oprigede nummer.

## Mute-funktion

---

Hvis du ønsker det, kan du snakke privat med nogen anden i rummet uden af personen i samtalen hører det. Du kan stadig høre personen i røret men de kan ikke høre dig, når telefonen er sat på mute.

For at aktivere mute under en samtale, tryk på knappen **MUTE**  en gang (mute LED-lyset vil lyse). Personen i røret kan ikke længere høre dig.

Tryk på  igen for at genoptage samtalen med personen i røret (mute LED-lyset vil blive slukket).

## Brug af høreapparat

---

Denne telefon er kompatibel med høreapparat. Vælg T-status på dit høreapparat for at aktivere denne funktion.

# HUKOMMELSE



## Blinkesignal


Blink-**KNAPPEN R** kan bruges sammen med specielle tjenester så som ventende samtaler (hvis din udbyder tilbyder det) eller viderestilling af eksterne samtaler til et andet nummer indenfor et privat switchboard.

## Lægge et nummer ind i hukommelsen

Der er 11 huske-knapper (**M1**, **M2** og **M3** og 8 foto-ringeknapper). Du kan sætte din kontakt billed under glasset i knappen. Dette er meget nyttigt hvis du plejer at glemme telefonnumre eller navne.

Løft røret

Tryk  Tast telefonnummeret ind som du vil gemme (op til 32 cifre). Hvis det behøves, kan du bruge knappen  for at indsætte et mellemrum

Tryk på  igen.

Vælg det ønskede sted hvor det skal gemmes (**M1**, **M2** og **M3** eller 1 af de 8 foto-ringeknapper). Telefonnummeret vil blive gemt på den placering

Hvis man gemmer et nyt telefonnummer på en placering hvor der allerede findes et nummer, vil det oprindelige nummer automatisk blive slettet

På siden af telefonen findes der en oversigt så du kan skrive placeringen ned på dine telefonnumre.

# TROUBLESHOOTING

## Ringte til et nummer fra hukommelsen

---

Løft røret

Tryk på den ønskede placering i hukommelsen (**M1**, **M2** eller **M3** eller 1 af de 8 foto-ringeknapper)

Der vil automatisk ringes op til nummeret

## PHOTOPHONE100 ringer ikke

- Sikr at telefonledningen er korrekt sat i og ikke er beskadiget.
- Tilslut en anden telefon til telefonstikket eller flyt telefonen til et andet stik for at afdække om fejler kommer fra din telefon eller dit telefonstik.
- Der kan være for mange kommunikationsapparater tilsluttet en enkelt telefonlinje, f.eks en anden telefon, modem eller fax. Kontakt din netværksudbyder for hjælp med at udregne begrænsningen for forbindelse i hjemmet eller din virksomhed.
- Sikr at telefonens ringestatus ikke er sat til OFF.

## Ingen ringetone

- Sikr at telefonledningen er korrekt sat i og ikke er beskadiget
- Tilslut en anden telefon til telefonstikket eller flyt telefonen til et andet stik for at afdække om fejler kommer fra din telefon eller dit telefonstik.
- Der kan være for mange kommunikationsapparater tilsluttet en enkelt telefonlinje, f.eks en anden telefon, modem eller fax. Kontakt din netværksudbyder for hjælp med at udregne begrænsningen for forbindelse i hjemmet eller din virksomhed.

# SIKKERHEDSINFORMATION

## **Generelt**

Åben ikke enheden. Kontakt kundeservice for alle reparationer.

## **Rengøring**

Rengør telefonen med en blød klud. Brug aldrig polervæske eller rengøringsmilder – de kan skade elektronikken indeni.

## **Miljømæssigt**

Må ikke udsættes for direkte sollys.

Sørg altid for, at telefonens overflader har en fri luftgennemstrømning.

Ingen af telefonens dele må nedsænkes i vand og den må ikke bruges i fugtige miljøer som f.eks. badeværelser.

Udsæt ikke dit produkt for ild eller andre farlige situationer.

Træk telefonledningen ud i tilfælde af tordenvejr da det kan skade din telefon. Din garanti dækker ikke skader ved tordenvejr.

Telefonen designet for at fungere inden for temperature fra 5°C til 45°C.

# GARANTI

Fra det øjeblik du køber din Geemarc PhotoPHONE100 garanterer Geemarc den i en periode på to år. I denne periode er alle reparationer og udskiftninger (efter vores vurderinger) gratis. Skulle du støde på nogle problemer kan du kontakte vores kundeservice eller besøge vores webside på [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Garantien dækker ikke ulykker, negligering eller ødelæggelse af nogle dele. Produktet må ikke modificeres eller skilles ad af nogen som ikke er en autoriseret repræsentant fra Geemarc.

Garantien fra Geemarc begrænser på ingen måde dine juridiske rettigheder.

**VIGTIGT:** DIN KVITTERING ER DEL AF DIN GARANTI OG SKAL GEMMES OG FREMVISES I TILFÆLDE AF EN GARANTIREKLAMATION.

**Bemærk venligst: Garantien gælder kun  
In Danmark**

**ERKLÆRING:** Geemarc Telecom SA erklærer hermed at Photophone 100 er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante lovbestemmelser i the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive RED 2014/30/UE.

*CE-erklæringen om konformitet kan læses på [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*

**Telefonforbindelse:** Spændninger som er tilgængelige på telekommunikationsnetværket er betegnet TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) ifølge EN62368-1-standarden.

# GARANTI

Direktivet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er blevet brugt for produktet til slut i deres levetid og er blevet genbrugt på den bedst mulige måde.

Når dette produkt er færdigt, put det venligst ikke i skraldespanden. Vi beder dig bruge en af følgende muligheden for bortskaffelse:

- Fjern batterierne og deponer dem efter passende forskrifter. Deponer produkter i overensstemmelse med passende forskrifter.
- Eller giv det gamle produkt til forhandleren. Hvis du køber et nyt, bør de acceptere det.

Hvis du følger disse instruktioner, sikrer du personlig helse og beskytter miljøet.



For produktsupport og hjælp besøg vores webside på  
**[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)**

E-mail: **[help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)** Telefon : **01707 387602**

linjerne er åbne 09-00 til 16-00 mandag til fredag  
2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex,  
Frankrig

Dette produkt er produceret i Kina for Geemarc Telecom













UGPhotoPH100\_Dk\_v2.0



2 rue Galilée, Parc de l'Etoile,  
59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX,  
FRANCE

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)